

KIT RHINO CRICOTIROIDOTOMÍA ALL IN ONE

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO: 18X25 cm.

PESO: 123 g.

REFERENCIA: CPS0001



DESCRIPCIÓN

El Kit todo en uno de cricotiroidotomía, de Rhino Rescue, es el kit ideal para realizar una cricotiroidotomía en entornos austeros. Para facilitar tanto el entrenamiento como las situaciones de fuego real, sus componentes se proporcionan en el orden adecuado de uso. Una vez desenrollado, el estuche proporciona una superficie de trabajo limpia para el usuario, lo que lo hace viable para su uso en entornos con poca luz y de combate. El kit también proporciona un tubo traqueal que es tanto del tamaño como de la longitud ideales, junto con un dispositivo de fijación para ayudar en el tratamiento secundario y la evacuación táctica. Para combatir la contaminación microbiana, este kit se suministra con almohadillas de alcohol para desinfección inmediata.



CARACTERÍSTICAS

- Proporciona todos los componentes necesarios para llevar a cabo una cricotiroidotomía quirúrgica.
- Se incluye un tubo traqueal del tamaño y longitud ideales con dispositivo de fijación.
- Los componentes están configurados en la secuencia de uso y son ideales para entornos con poca luz y combate.



CONFIGURACIÓN DEL KIT




DESCRIPCIÓN

1x Bolsa.
1x Bisturí desechable N° 10
1x Jeringa estéril de 10 cc.
1x Correa de sujeción del tubo


1x Gancho traqueal.
1x Compresa de herida - 2 ud.
1x Tubo de traqueostomía.
2x Almohadilla de alcohol.

INSTRUCCIONES DE USO


1. Palpea hacia abajo desde el cartílago tiroides para encontrar la membrana cricotiroides.
2. Si la situación lo permite, asegúrate de limpiar el sitio de inserción.

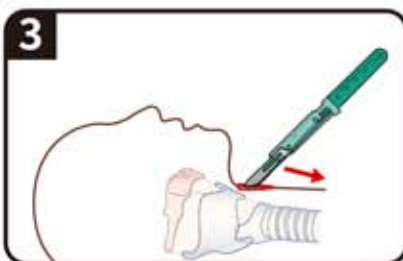


3. Realiza una incisión vertical desde el borde inferior del cartílago tiroides hasta la parte superior del cartílago cricoides.

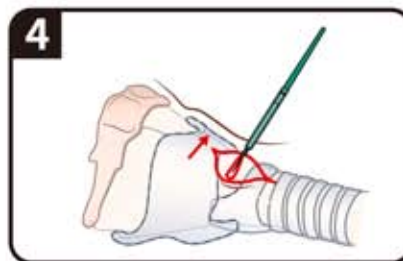


4. Coloca el bisturí horizontalmente, perfora a través de la membrana cricotiroides.

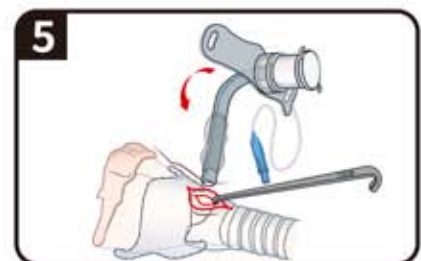


5. Usa el gancho traqueal, insértalo y levántalo contra el anillo traqueal. Inserta la punta del tubo traqueostómico.

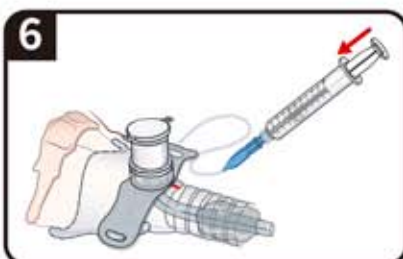

6. Infla el manguito con aire.

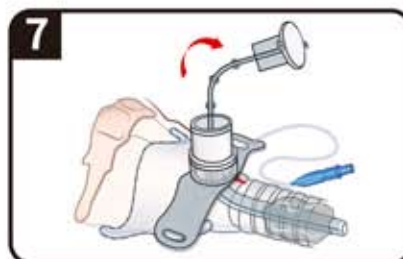

7. Retira el catéter guía.

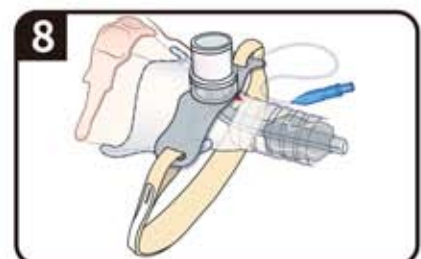

8. Asegura el tubo de traqueostomía con la correa de sujeción del tubo.

